

ISTRUZIONI D'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO



La prima regolazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Applicare la cintura vita e chiuderla su se stessa (fig. 1), se possibile preferibilmente in posizione alta in modo che risulti qualche centimetro più alto del gomito.
2. Indossare la sacca reggibraccio e regolare a misura grazie alla zona grippante e vellutino presente nella regione del gomito (fig. 2). Chiudere il passante come in figura 3. La sacca reggibraccio dovrà risultare allineata alla clavicola lussata.
3. Prendere la spallina principale e appoggiarla sopra alla clavicola lussata, non troppo in posizione laterale (fig. 4). Regolare e chiudere i tiranti 1 e 2 (figg. 4-5). Se necessario è possibile regolare la lunghezza della cinghia rimuovendo il terminale a strappo numerato e tagliando a misura la cinghia e riposizionare il terminale e chiudere.
4. Portare la cinghia controlaterale con terminale numerato 3 sotto l'ascella chiuderla ancorandola al cerchio (fig. 6) se necessario è possibile rimuovere il terminale a strappo numerato, tagliare a misura la cinghia e riposizionare il terminale.
5. Regolare e chiudere le cinture posteriori 4, 5 e 6 (figg. 7, 8 e 9) se necessario rimuovere il terminale a strappo numerato, tagliare il materiale in eccesso e riposizionare il terminale.
6. Regolare la lunghezza delle fasce 1 e 5 portando contemporaneamente in tensione le cinghie numerate e farle aderire su e stesse (fig. 10).

L'ortesi deve garantire l'immobilità del braccio.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE: PER IL PAZIENTE

Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se viene rimossa durante una visita medica, è possibile semplicemente allentando la cintura 3 (fig. 11), sfilando la 2 e la 1 (figg. 12-13), aprire il passante sulla sacca (fig. 14) e infine sganciare la cintura vita (fig. 15).

1. Applicare la cintura vita e chiuderla su se stessa (fig. 15), se possibile preferibilmente in posizione alta anziché bassa in modo che risulti qualche centimetro più alto del gomito.
2. Indossare la sacca reggibraccio e chiudere con il cinturino la sacca (fig. 14). Assicurarsi che la sacca reggibraccio sia ancorata alla cintura vita con il sistema a strappo.
3. Prendere la spallina principale e appoggiarla sopra alla clavicola lussata, chiudere le cinture 1, 2 e 3 (figg. 13, 12, 11).
4. Assicurarsi che tutte le cinghie siano tese.

