

# ISTRUZIONI PER L'USO

## PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

### AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

1. Aprire tutte le chiusure a strappo, comprese quelle della mano.
2. Posizionare il cuscino a livello di abduzione consigliato dal medico (fig. 1).
3. Passare la cintura sopra la spalla opposta e poi attraverso la fibbia del cuscino e chiudere il nastro (fig. 2).
4. Successivamente posizionare la cintura addominale intorno al giro vita e chiuderla con il sistema a strappo (fig. 3).
5. Fissare sulla parte posteriore del cuscino l'asta palmare con pallina (fig. 4).
6. Fissare le due cinture dell'avambraccio all'asta palmare e la fascia del braccio leggermente in diagonale sul cuscino (fig. 5).
7. Posizionare il braccio all'interno e chiudere tutte le cinture, evitando di stringere troppo. Ruotando il cuscino è possibile ottenere un'abduzione da 30° a 70° (figg. 6 e 7).

### AVVERTENZA

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

## APPLICAZIONI SUCCESSIVE:

1. Appoggiare il cuscino a livello di abduzione consigliato (fig. 1).
2. Far passare la cinghia sopra la spalla opposta e chiudere facendo aderire al cuscino (fig. 2).
3. Indossare la cintura addominale (fig. 3).
4. Aprire e sistemare il braccio all'interno delle cinghie di avambraccio e braccio (figg. 6 e 7).

### NOTA

Comprimendo la pallina è possibile allenare la muscolatura dell'avambraccio.

